

Anwendung und Versand von 'GOcard-SC¹ in DNA-Programmen von Generatio



1. Vorsichtsmaßnahmen und Vorbereitungen

Bitte stellen Sie sicher, dass die Probenfläche jeder GOcard-SC ausschließlich mit dem Material des zugehörigen Tieres in Kontakt kommt. Kontaminationen können von Karte zu Karte oder von außen erfolgen. GOcard-SC daher nicht stapeln und die Aufnahmeflächen niemals in Berührung bringen. Hantieren Sie immer nur mit einem Tier und tragen Sie dabei, wenn möglich, Einmalhandschuhe.

Die Benutzung der GOcard-SC erfolgt auf eigenes Risiko und eigene Verantwortung. Sie sollten Ihr Tier so handhaben wie es bei einer Behandlung durch den Tierarzt oder bei der Tätowierung erfolgt.


Es empfiehlt sich die GOcard-SC für jedes Tier vorab mit der Identifikation zu versehen, mit der das jeweilige Tier erkannt wird. Bis zum Einsatz sollte die Karte dann, mit bedecktem Probenfeld, zugeklappt bleiben.

2. Blutproben

Reinigen und desinfizieren sie ein Ohr mit Alkohol/Spiritus.

Entfernen Sie die gelbe Sicherheitskappe der Blutlanzette durch DREHEN, mit DRUCK auf die gelbe Fläche fährt die Lanzette aus.


1-2 mm vom Rand des Ohrs mit der Lanzette punktieren und warten bis Blutstropfen hervorquellen.

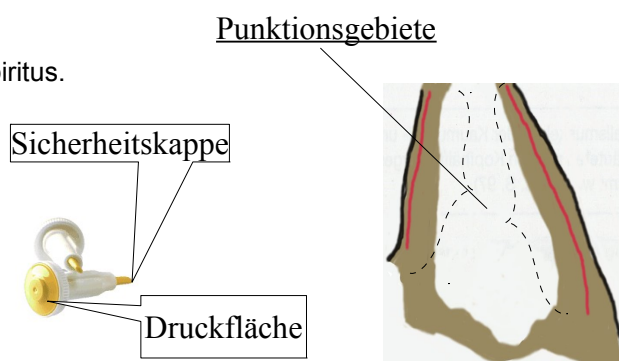

Massieren des Ohrs von der Ohrwurzel in Richtung Einstichstelle fördert den Blutfluss. Im Winter empfiehlt es sich die Durchblutung durch Wärmen der Ohren zu verbessern.

Die Aufnahmefläche der GOcard's-SC auf die punktierten Stellen drücken und das Blut aufsaugen. Bitte nochmals sicherstellen, dass die Beschriftung der Karte auf das beprobte Tier verweist.

Im Standardprogramm sollten mindestens 2 Blutstropfen mit einem Durchmesser von ~ 5 mm [A] oder aber zahlreiche kleinere Tröpfchen mit ca. 2 mm Durchmesser [B] eingereicht werden.

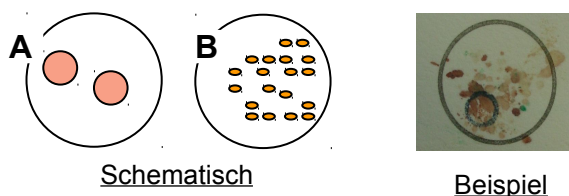

Achtung: Vollständig an der Luft trocknen lassen (ca. 1 Stunde). Nicht direkter Sonne oder Hitze aussetzen.

3. Schleimhautproben aus dem Maul

Die Probenfläche mit der Kreismarkierung auf die Schleimhaut des Kiefers drücken und mit leichtem Druck darüber ziehen. Vollständig durchtrocknen lassen. Zwischen der letzten Fütterung und der Probennahme sollte mindestens 1 Stunde liegen.

Hinweis: Bei der Analyse sind Abstriche von Schleimhautzellen nicht so ausfallsicher wie Blutproben.

4. Versand

Material, das auf GOcard-SC FTA-Matrixpapier gebunden ist, gilt als vollständig inaktiviert für Erreger. Zum Versand die trockenen GOcard-SC in das Plastiktütchen überführen und für jede individuelle GOcard-SC ein Auftragsformular beifügen. Versandadresse:

Generatio
Bahnhofstr, 53
D-69115 Heidelberg

Kontakt: Tel.: +49 (0)6221-3893530; Fax: +49 (0)6221-3893531; mail: office@generatio.com

¹ Copyright Generatio 2009 ©. GOcard und Generatio sind Warenzeichen von Dr. Manz, Generatio. GOcard-SC ist eine Adaptation der FTA®-Card von Whatman Int. unter Anwendung des original FTA-Materials. FTA ist eine Warenzeichen der Whatman® Group, USA.